

Кресло-стул с санитарным оснащением

Стул санитарный предназначен для использования как в специализированных учреждениях, так и в домашних условиях. Легко складывается и разбирается. Используется как передвижное санитарно-гигиеническое приспособление.



Характеристики:

- Расстояние от ручек для сопровождающего лица до спинки 10 см
- Опоры для ног регулируются по высоте в 6 положениях, съемные, откидные, установлены под углом в 100°
- Спинка регулируется по высоте в 6 положениях с шагом 2,5 см и регулируется от 36 см до 48 см
- Подлокотник фиксированный
- Шины передних и задних колес цельнолитые
- Подножки регулируются на 9,5 см в 6 положениях, оснащены ремнями для голени
- Конструкция стула позволяет пользоваться стационарным унитазом



Как правильно пересаживаться на кресло-каталку с санитарным оснащением?

Помните, что, совершая пересаживание, во всех случаях лучше воспользоваться сторонней помощью, чтобы предупредить возможность получения травм.

Общие правила пересаживания:

1. Как можно ближе расположите стул с санитарным оснащением к месту пересаживания, либо к себе, если пересаживаетесь на стул с санитарным оснащением.
2. Пересаживание осуществляйте только на ровных поверхностях, избегая наклонные.
3. Заблокируйте задние колеса тормозами.
4. Откиньте подлокотники.
5. При пересаживании на стул с санитарным оснащением необходимо упереться одной рукой о подножку санитарного стула и совершить пересаживание. При пересаживании со стула с санитарным оснащением опустите ноги с опоры для стоп на пол и, удерживаясь руками за устойчивую опору, не зависящую от стула, перенесите вес тела на руки и осуществите высадку со стула.